

Fresco Gelprodukter för fingrar och tår är tillverkade av en patenterad polymergel. Produkterna finns både med och utan beklädnad. De textilkädda produkterna ger en viss kompression medan produkterna utan textil ger minimal kompression. Gelen i produkterna avger långsamt en medicinsk mineralolja som mjukar upp och fuktar huden.

Frescos gelplatta är tillverkad av 100% medicinskt klassad mjuk silikon. Även denna finns både med och utan beklädnad.

Samtliga Frescoprodukter är latexfria samt hud- och allergitestade.

ANVÄNDNINGSMOMRÅDE

- * Skyddar mot tryck och skav
- * Motverkar ärrbildning
- * Tryckavlastande
- * Kan användas mot besvär som orsakats av torrhet
- * Hyperestesi
- * Kompression

TIPS

Produkterna kan rengöras (handtvätt) och användas på nytt. Rengör, lufttorka och strö lite talkpuder på produkten.

REKOMMENDATIONER

- * Tvätta och torka området som ska behandlas.
- * Dra strumpan/tuben över exempelvis fingret och placera gelen direkt över området som ska behandlas.

För fler rekommendationer och tips, se bruksanvisning eller www.catell.se

VARNING

- * Produkterna får ej läggas på öppna sår.
- * Om irritation, obehag eller nedsatt cirkulation uppstår, kontakta läkare.